

NOTICE Masque « **GRAND PUBLIC** » (Petite taille)

Exclusivement réservés à des usages non sanitaires,  
Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020

- **Nom fabricant** : TEXTILE EVENTS 30 rue du Bois Moussay – 93240 Stains
- Référence du produit ou nom commercial : **Masque en Coton**
- **Domaine d'utilisation** : Ce masque est destiné au milieu grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. **Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.** L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes barrières.  
Masques de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.
- Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.
- Masque **CATEGORIE 2**  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : **82%**  
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air **161L/m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>** pour une dépression de 100 Pa  
*Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire de la CERTAM (rapport ref : **mgp\1973\_TEXTILE EVENTS MASQUE EN COTON TEXTILE EVENTS\_MASQUE EN COTON\_04092020\_12h11.pdf**) et qui supporte 50 lavages*
- **Recommandations et limite d'utilisation** : le temps de port du masque est limité à 4 heures.  
Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.
- **Recommandations de manipulation des masques** :
  - Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
  - Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
  - Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
  - Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
  - Pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, décrocher l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac en plastique en attendant de le laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



- **Entretien du masque** : Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.
- **Méthode de lavage**  
Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu à une température de 60°C  
Séchage mécanique ou séchage à l'aire libre, suivi dans les 2 cas d'un repassage. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 50 fois.
- **Stockage** : masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.
- **Contexte d'utilisation** : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
- **Composition** : 100% Coton
- **Avertissement** : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

**MASQUE GRAND PUBLIC LAVABLE 50 X UNS 2**

**Petite taille**

**REF : Masque en Coton**

Description :

- Masque de protection en tissu coton de catégorie 2 / UNS 2
- Mise en place facile et rapide grâce aux élastiques sur les extrémités permettant une fixation sur le visage
- Barrette nasale pour ajuster le masque au niveau du nez et éviter la buée sur les lunettes
- Matière douce et confortable
- Couverture du nez au menton
- Dimension 15 cm x 7.5 cm avec 3 plis

Composition :


- 2 couches 100% coton
- 2 élastiques aux extrémités
- 1 barrette nasale

Caractéristiques techniques :

- Performances : protection > 82% aux projections de 1µm et 3µm avec une respirabilité > 161l.m<sup>2</sup>
- Entretien : Masque lavable 50 fois en machine à 60° pendant 30 min
- Coloris : Blanc
- Durée d'utilisation : 4 h maximum
- Conformité : Testé conforme à la catégorie 2 des masques lavables par le laboratoire de la CERTAM – [RAPPORT MASQUE EN COTON 50 LAVAGES](#)
- Conditionnement par sachet de 20
- Fabriqué en France



**Ce n'est pas un masque médical, mais de première nécessité  
faisant barrière aux projections de postillons**

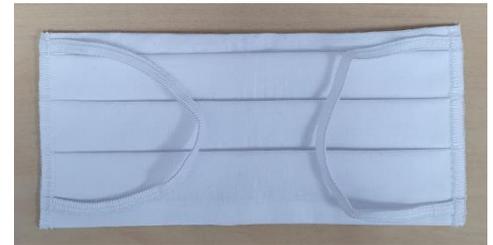

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**

